


DONJOY[®]

BRUGERVEJLEDNING

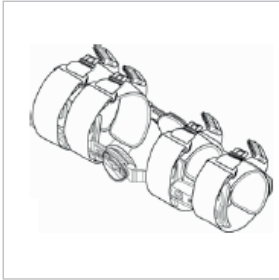


TROM™ ADVANCE




Åbn spændet på hver rem og fold skinnen helt ud. Læg benet ind i skinnen og tilpas remmene indtil leddene flugter med patella (knæskallen) og midterlinjen af benet.


NB. Skinnen vender rigtigt, når indstillingsknappen sidder over knæet.

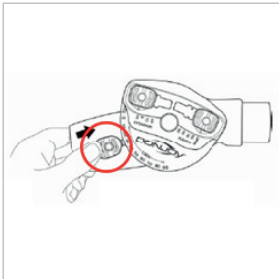


Indstillingsknappen skal sidde over knæet.

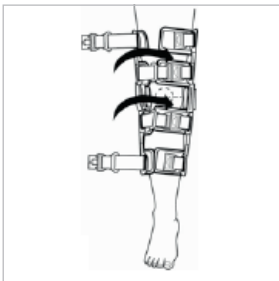


Spænd de to remme nærmest knæet.

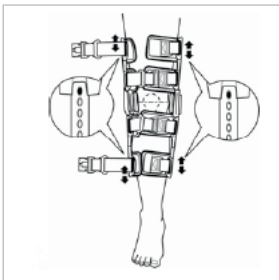


Juster længden af lægskinnerne ved at trykke på den grå knap, træk herefter skinnen ud i den ønskede længde. Sørg for, at skinnen har samme længde i begge sider, og at den enkelte rem sidder fast i samme position i begge sider.

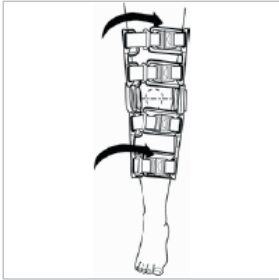

Fastgør de sidste to remme. Remmene løsnes ved at de trækkes væk fra skinnen, træk godt i dem, så de strammes på bagsiden af benet, mens led og skinne holdes på plads på benet. Remmene kan afkortes ved at den dobbelte Y-formede velcrostrop tages af, remmen afkortes, og Y-stroppen sættes på igen.

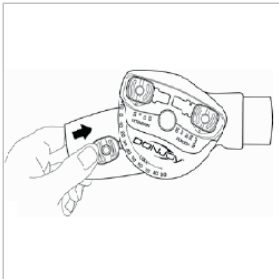

For at låse leddet bruges indstillingsknappen på lårskinden.

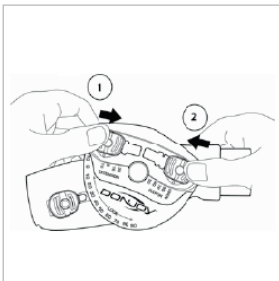

For at indstille ekstension og fleksion bruges de grå knapper på leddet.

Link til YouTube video:
Indstilling af DonJoy knæskinne



Anlæggelse af DonJoy knæskinne



► **BESTILLINGSINFORMATIONER**

| Varenummer | Polster |
|------------|-----------------|
| 11-9114-9 | Cool |
| 11-9115-9 | Fuldt |
| Tilbehør | Beskrivelse |
| 11-2022 | Fuldt polster |
| 11-2024 | Cool polster |
| 11-2025 | Stropper |
| 11-2020 | Venstre Bar Kit |
| 11-2021 | Højre Bar Kit |